

# Gelificador

Para Bolsas de Estomia

Grânulos para absorção de líquidos para bolsas de estomia

# VUELO

PHARMA

## Descrição

O **Gelificador para bolsas de estomia VUELO** é constituído de grânulos de polímero acrílico, com grande capacidade de absorção, que permite a gelificação do líquido existente no interior da bolsa, diminuindo o odor, ruídos e possíveis vazamentos.

Quando em contato com líquido, apresenta coloração. Possui fragrância agradável de óleo essencial de lavanda.

**Composição:** polímero acrílico, óleo essencial de lavanda, celulose microcristalina, corante azul brilhante [CI 42090], corante azul patente [CI 42051].

**Precauções e advertências:** não utilizar o produto fora do prazo de validade. Em caso de irritação, suspenda o uso e consulte seu médico.

**Manter fora do alcance de crianças.**



**Não ingerir.**

**Uso externo.**

**Armazenagem:** manter em temperatura ambiente e ao abrigo da umidade. Armazenar em local seco e limpo.

**Data de fabricação, vencimento e lote:** vide embalagem.

**Indicações de uso:** Gelificar urina e fezes líquidas no interior de qualquer modelo de bolsa de estomia.

## Instruções de uso

Após o esvaziamento, a limpeza ou a troca da bolsa de estomia, insira uma ou mais cápsulas do **Gelificador VUELO** no interior da bolsa. Ao entrar em contato com os fluidos corpóreos, o **Gelificador VUELO** transformará os líquidos do interior da bolsa em gel e liberará agradável aroma de lavanda. Uma cápsula gelifica até 100ml de líquido.

**Sugestão de uso: utilize de 3 a 4 cápsulas a cada troca/higienização da bolsa de estomia.**

# VUELO

*Fabricado e registrado por:*

**Vuelo Pharma Ltda.**

Rua Antônio de Paula Braga, 83

Almirante Tamandaré, Paraná

CEP: 83506.010

CNPJ 04.159.536/0001-05

**vuelopharma.com**

sac@vuelopharma.com

Tel/Fax: 41 3657.7611

SAC: 41 3657.9342

**Responsável técnico**

Helen de Moraes A. de Souza

CRF-PR 31.612



Registro ANVISA  
80074789001