

# Spray de Barreira

Protetor cutâneo

# VUELO

PHARMA

## Descrição

O **Spray de Barreira VUELO** é uma solução polimérica líquida de secagem rápida, incolor, não gordurosa, resistente à água e sem álcool que forma uma película protetora e uniforme quando aplicado na pele, sem provocar irritações. Dessa forma protege-a por até 72 horas de lesões decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucros digestivos (ostomias), fricção e adesivos.

O Spray de Barreira VUELO deve ser aplicado na pele saudável. Não causa ardência ou desconforto.

Dermatologicamente testado.

**Indicações de uso:** Proteção da pele ao redor de ostomias (periestoma) e fístulas; prevenção de lesões de pele decorrentes fricções, excesso de umidade, incontinências urinárias e/ou fecais ou sucros digestivos (ostomias); proteção contra processos alérgicos causados por adesivos e fitas de fixação; proteção da pele ao redor de cânulas de entubação, traqueostomias e gastrostomias; proteção da pele contra dermatites, irritações, cisalhamentos e agressões de adesivos causadas pela troca frequente de curativos ou bolsas de ostomia.

**Contraindicações:** O Spray de Barreira Vuelo não deve ser usado em pele lesionada ou irritada.

**Composição:** Disiloxane, trimethylsiloxysilicate, isododecane, acrylates / polytrimethylsiloxy methacrylate copolymer, dimethicone / trimethylsiloxysilicate.

**Instruções de uso:** A pele deve estar limpa e seca antes da aplicação do Spray de Barreira VUELO. Mantenha o aplicador a uma distância de 10 a 15 cm da pele e pulverize uma camada lisa e uniforme de película na região que requer proteção. Deixe secar completamente. Se uma segunda camada for necessária, deixe a primeira secar antes de aplicar a segunda. É indicada a aplicação do Spray de Barreira VUELO a cada 72 horas. Não é necessário remover a película existente antes da reaplicação.

Nos casos de incontinência urinária e/ou fecal ou casos em que houver a necessidade de limpezas frequentes, a reaplicação é indicada a cada 24 horas ou quando se fizer necessário. Para proteção sob adesivos, reaplique a cada troca de fitas adesivas ou curativos. Caso deseje, a película poderá ser removida com um solvente de adesivos de uso hospitalar, de acordo com as instruções de uso do solvente, evitando a fricção da pele para prevenir lesões.

**Precauções:** Suspender o uso caso ocorra eritema ou qualquer outro sinal de irritação e, caso os sintomas persistam, consulte seu médico. O uso concomitante de outros produtos de proteção como cremes, loções e pomadas pode diminuir a eficácia do Spray de Barreira VUELO.

**Advertências:** O Spray de Barreira VUELO é inflamável, por isso, seu uso é indicado em áreas ventiladas, longe de chamas, faíscas e outras fontes de ignição. Manter fora do alcance de crianças. **Cuidado! Altamente inflamável.**

**Armazenagem:** Manter a temperatura entre 15 e 40°C em local seco e limpo. Manter longe do calor, chamas e outras fontes de ignição.

**Manter fora do alcance de crianças.**

**Uso externo.**

## VUELO

*Fabricado e registrado por:*

**Vuelo Pharma Ltda.**

Rua Antônio de Paula Braga, 73

Almirante Tamandaré, Paraná

CEP: 83506.010

CNPJ 04.159.536/0001-05

**vuelopharma.com**

sac@vuelopharma.com

Tel/Fax: 41 3657.7611

SAC: 41 3657.9342

**Responsável técnico**

Helen de Moraes A. de Souza

CRF-PR 31.612



Registro ANVISA  
80074780003