

## Spray de Barreira

Protetor cutâneo

### Descrição

O **Spray de Barreira Vuelo** é uma solução polimérica líquida de secagem rápida, incolor, não gordurosa, resistente à água e sem álcool que forma uma película protetora e uniforme quando aplicado na pele, sem provocar irritações. Dessa forma protege-a por até 72 horas de lesões decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucros digestivos (ostomias), fricção e adesivos.

O **Spray de Barreira Vuelo** deve ser aplicado na pele saudável. Não causa ardência ou desconforto.

Dermatologicamente testado.

### Indicações de uso

Proteção da pele ao redor de ostomias (periestoma) e fístulas; prevenção de lesões de pele decorrentes de fricções, excesso de umidade, incontinências urinárias e/ou fecais ou sucros digestivos (ostomias); proteção contra processos alérgicos causados por adesivos e fitas de fixação; proteção da pele ao redor de cânulas de entubação, traqueostomias e gastrostomias; proteção da pele contra dermatites, irritações, cisalhamentos e agressões de curativos ou bolsas de ostomia.

### Contraindicações

O **Spray de Barreira Vuelo** não deve ser usado diretamente na pele lesionada ou irritada.

### Composição

Disiloxane, trimethylsiloxylate, isododecane, acrylates / polytrimethylsilyloxy methacrylate copolymer, dimethicone / trimethylsiloxylate.

### Instruções de uso

A pele deve estar limpa e seca antes da aplicação do **Spray de Barreira Vuelo**. Mantenha o aplicador a uma distância de 10 a 15 cm da pele e pulverize uma camada lisa e uniforme de película na região que requer proteção. Deixe secar completamente. Se uma segunda camada for necessária, deixe a primeira secar antes de aplicar a segunda. É indicada a aplicação do **Spray de Barreira Vuelo** a cada 72 horas. Não é necessário remover a película existente antes da reaplicação.

Nos casos de incontinência urinária e/ou fecal ou casos em que houver a necessidade de limpezas frequentes, a reaplicação é indicada a cada 24 horas ou quando se fizer necessário. Para proteção sob adesivos, reaplique a cada troca de fitas adesivas ou curativos. Caso deseje, a película poderá ser removida com um solvente de adesivos de uso hospitalar, de acordo com as instruções de uso do solvente, evitando a fricção da pele para prevenir lesões.

### Precauções

Suspender o uso caso ocorra eritema ou qualquer outro sinal de irritação e, caso os sintomas persistam, consulte seu médico. O uso concomitante de outros produtos de proteção como cremes, loções e pomadas pode diminuir a eficácia do **Spray de Barreira Vuelo**.

### Advertências

O **Spray de Barreira Vuelo** é inflamável, por isso, seu uso é indicado em áreas ventiladas, longe de chamas, faíscas e outras fontes de ignição. Manter fora do alcance de crianças. **Cuidado! Altamente inflamável.**

### Armazenagem

Mantem a temperatura entre 15 e 40°C em local seco e limpo. Manter longe do calor, chamas e outras fontes de ignição.

**Importante: limpe a saída da válvula após o uso.**

**Manter fora do alcance de crianças.**

**Uso externo.**

## VUELO

Fabricado e registrado por:  
**Vuelo Pharma Ltda.**

Rua Carlos Muller, 315  
Curitiba, Paraná  
CEP 81280.380  
CNPJ 04.159.536/0001-05

**vuelopharma.com**

sac@vuelopharma.com  
Tel/Fax: 41 3657.7611  
SAC: 41 3657.9342

### Responsável técnico

Helen de Moraes A. de Souza  
CRF-PR 31.612



Registro ANVISA  
80074780003